

Οδηγίες προετοιμασίας δείγματος



GeneKor
Committed to Biotechnological Innovation

Το βασικό μέλημα της GeneKor είναι η συνολική μάζα των κυττάρων που υποβάλλεται να είναι επαρκής για την εξαγωγή της ποσότητας DNA που είναι απαραίτητη για την ανάλυση. Αυτή η λίστα ελέγχου σχεδιάστηκε για να μας βοηθήσει να συνεργαστούμε ώστε να προσδιορίσουμε το καλύτερο δείγμα για κάθε ασθενή. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις.

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ


ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το αίμα θα πρέπει να συλλέγεται σε ειδικά φιαλίδια που διατίθενται από την GeneKor (φιαλίδια Cell-Free DNA ή/και RNA BCT®). Η συλλογή αίματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο κέντρο της επιλογής σας. Η GeneKor δεν λαμβάνει αίμα στις εγκαταστάσεις της ή σε άλλη τοποθεσία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1. Γεμίστε το φιαλίδιο τελείως (10 ml)
2. Δεδομένου ότι τα φιαλίδια Cell-Free DNA/RNA BCT® περιέχουν χημικά πρόσθετα, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η παλίνδρομη ροή από το φιαλίδιο.
3. Αναμείξτε αμέσως ανακινώντας ελαφρά 8 με 10 φορές. Η ανεπαρκής ή καθυστερημένη ανάμειξη μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα της ανάλυσης ή σε ανεπαρκή απόδοση του προϊόντος.
4. Το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί για τουλάχιστον 7 ημέρες, σε θερμοκρασία από 6-37°C. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ το δείγμα.

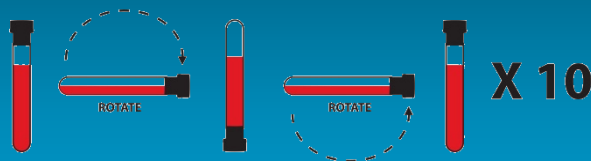

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1. Τοποθετήστε το έντυπο αίτησης της GeneKor και όλα τα σχετικά ασφαλιστικά έγγραφα και εκθέσεις του ασθενή στο GeneKor Specimen Kit.
2. Τοποθετήστε το GeneKor Specimen Kit (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης GeneKor και των σχετικών εκθέσεων ασθενούς και ασφαλιστικά έγγραφα) στη συσκευασία που διατίθεται και σφραγίστε τη.

3. Στείλετε το ολοκληρωμένο GeneKor Specimen Kit (έντυπο αίτησης ασφαλιστικά στοιχεία και δείγματα) στη διεύθυνση:

GeneKor Medical S.A.
Λ. Σπάτων 52.
153 44 Γέρακας, Αθήνα

Τοποθετήστε όλα τα μέρη του δείγματος (έντυπο στοιχεία και δείγματα) στο GeneKor Specimen Kit και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για να προγραμματίσετε την παραλαβή.

www.genekor.com

Καλέστε στο **210 603 2138** για ερωτήσεις ή για να ζητήσετε GeneKor Specimen Kits.

info@genekor.com