

Οδηγίες προετοιμασίας δείγματος



Genekor
Committed to Biotechnological Innovation

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη δειγματοληψία υγρής βιοψίας, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 3 εβδομάδες μετά την τελευταία χημειοθεραπεία.

ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ


Το αίμα θα πρέπει να συλλέγεται σε ειδικά φιαλίδια που διατίθενται από την Genekor (φιαλίδια Cell-Free DNA BCT®). Η συλλογή αίματος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο κέντρο της επιλογής σας, διαφορετικά επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Genekor για να σας κατευθύνει.



⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

- Γράψτε το ονοματεπώνυμο ή/και τον κωδικό του εξεταζόμενου στο φιαλίδιο.
- Χρησιμοποιήστε πεταλούδα αιμοληψίας 21G με ενσωματωμένη βελόνα διατρήσεως σωληναρίων κενού Vacutainer. Η πεταλούδα παρέχεται μαζί με το Kit.
- Γεμίστε το σωληνάριο κενού Vacutainer που παρέχεται, έως την αυτόματη πλήρωσή του (10ml αίματος).
- Δεδομένου ότι τα φιαλίδια Cell-Free DNA BCT® περιέχουν χημικά πρόσθετα, είναι σημαντικό να αποφεύγεται η παλίνδρομη ροή από το φιαλίδιο.
- **Μην ανακινείτε το φιαλίδιο! Αναμείξτε αμέσως περιστρέφοντας το φιαλίδιο 10 φορές απαλά**, με ταυτόχρονη περιστροφική κίνηση του καρπού.
- Η ανεπαρκής ή καθυστερημένη ανάμειξη μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα αποτελέσματα της ανάλυσης ή σε ανεπαρκή απόδοση του προϊόντος. Το δείγμα μπορεί να διατηρηθεί έως 7 ημέρες, σε θερμοκρασία από 6-25°C.
- **ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ.**

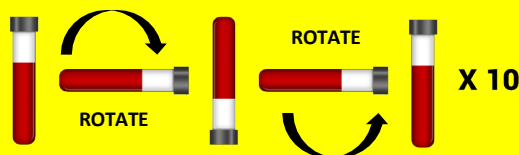

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

* Κατά τη θερινή περίοδο, συστήνουμε να υπάρχει μια παγοκύστη μέσα στο Kit. Η παγοκύστη **ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ** να έρχεται απευθείας σε επαφή με το δείγμα, προτείνεται να τοποθετείται κάτω από το αφρολέξ του Kit.

1. Τοποθετήστε το φιαλίδιο με το αίμα στο ειδικό σακουλάκι που περιέχεται στο Kit και στην συνέχεια τοποθετείστε το, στην ειδική υποδοχή του Kit.
2. Τοποθετήστε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα μέσα στο Kit.

3. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για την παραλαβή του Kit ή αποστείλετε το απευθείας στην Genekor.

ΠΡΟΣΟΧΗ, φιαλίδια που δεν φέρουν το ονοματεπώνυμο ή/και τον κωδικό του εξεταζόμενου **ΔΕΝ** θα γίνουν δεκτά.

Genekor Medical S.A.
Λ. Σπάτων 52.
153 44 Γέρακας, Αθήνα
www.genekor.com

Καλέστε στο **210 603 2138**
για ερωτήσεις ή για να
ζητήσετε Genekor Specimen
Kits.

info@genekor.com